

## **BKT, Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll burhöns som hålls i bur**

---

### **Träckprovtagning 2 x 150 gram eller 4 tygsvabbar**

Provtagningsinstruktionen ska användas inom den obligatoriska salmonellakontrollen för träckprovtagning av fjäderfä som hålls i bursystem. Observera att i flockar där det inte har samlats tillräcklig mängd träck på skrapor eller bandrensare vid bandens ändrar där tömning sker ska träckproven samlas med tygsvabbar i stället för plockprov. Antal prover som anges är per flock/ djurutrymme.

#### **DETTA BÖR FINNAS MED I UTSKICKET:**

##### **Träckprovstagning med plockprov**

- 3 plastpåsar
- 2 påsklämmor
- 1 följesedel och provtagningsanvisning
- 1 returkuvert

##### **Träckprovstagning med tygsvabbar**

- 4 tygsvabbar av större modell (ca 30 x 30 cm)
- 2 plastpåsar
- 1 påsklämma
- 1 följesedel och provtagningsanvisning
- 1 returkuvert

#### **INNAN DU BÖRJAR:**

- Läs igenom hela instruktionen.
- I system med band eller skrapor ska dessa köras på dagen för provtagningen innan provtagningen påbörjas.
- I system med gödselkällare kan tidningar läggas ut på gödselhögen dagen innan.
- Om tygsvabbar ska användas ska de fuktas med kranvatten från djurens stall (ska inte vara klorerat).
- Märk påsarna; detta är särskilt viktigt om prover från flera flockar skickas in samtidigt.
- Byt om och sätt på dig skoskydd samt skyddshandskar vid hygiengränsen.

#### **PROVTAGNING MED PLOCKPROVER I FLOCKAR MED GÖDSELMATTOR/SKRAPOR:**

Träckprovtagning med plockprov

- Träckprover samlas i två olika plastpåsar med 150 g träck i varje påse.
- Träckproven tas från naturligt blandad träck som samlats på skrapor eller bandrensare från samtliga gödselmattor eller skrapor i huset efter utgödsling.
- Materialet ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i de det totala provet som poolas på lab.
- Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.

Träckprovtagning med tygsvabbar

- Se till att utgödslingen är nyligen är körd.
- Svabba en så stor yta som möjligt på alla tillgängliga ändrar av gödselbanden med de fyra fuktade tygsvabbarna. Varje svabb ska vara täckt på båda sidorna med träck från band och skrapor eller bandrensare.
- Lägg de fyra tygsvabbarna i en påse och förslut med påsklämma.

## **BKT, Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll burhöns som hålls i bur**

---

### **PROVTAGNING I FLOCKAR UTAN GÖDSELMATTOR/SKRAPOR**

- Träckprover samlas i två olika plastpåsar med 150 gram i varje från 60 olika platser under burarna i gödselkällaren.
- Plockandet av träck ska ge ett representativt samlingsprov från hela det utrymme som flocken har tillgång till, alla bursektioner ska vara representerade. Träck från varje burrad ska ingå i de det totala provet som poolas på lab.
- Förslut påsarna med påsklämmor när du är klar.

### **EFTER PROVTAGNINGEN**

- Släng använda skyddshandskar och skyddssockor i lämpligt avfallskärl.
- Lägg de väl förslutna och märkta påsarna i en ren plastpåse.
- Fyll i följesedel.
- Lägg plastpåsarna med prover respektive följesedel i returkuvertet.
- Posta kuvertet/kuverten samma dag som proven tas.
- Undvik att ta eller skicka in proverna på fredagar eller dag före helgdag eftersom proverna kan bli liggande på posten.
- SVA utför inte odling för Salmonella på prover där det gått mer 4 dygn efter provtagning.